


Software

Overview 4000 (Betrachtung verschiedener Diagnostikergebnisse)

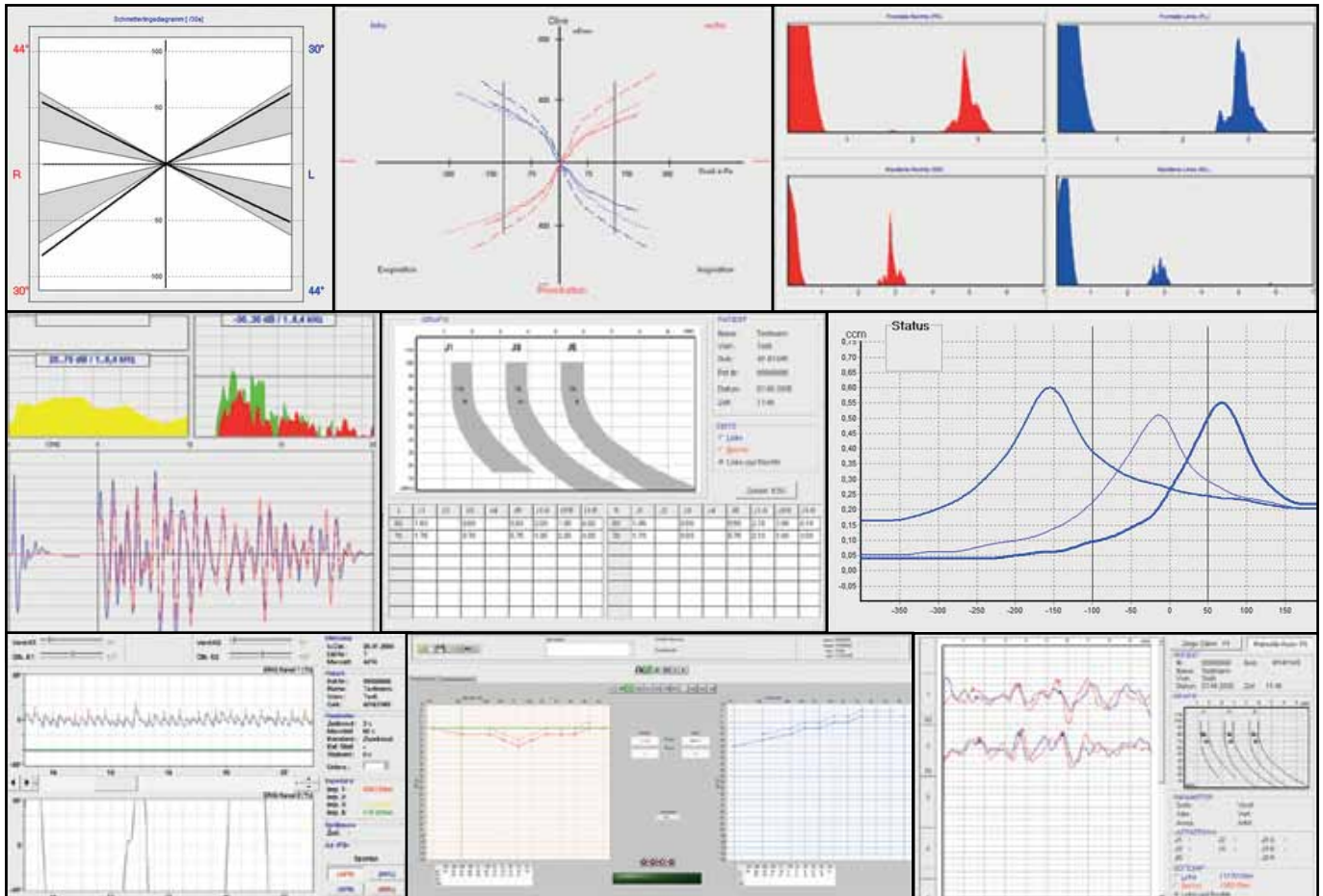

Mit dem Homoth Overview behalten Sie Ihre Messergebnisse im Überblick. Sie können die wichtigsten Punkte der Messergebnisse der Homoth-Geräte in einem Fenster sehen. Die Diagramme und die Kennwerte der Messungen werden für jedes Programm in einer Ansicht angezeigt.

Zur Navigation durch die Messungen eines Patienten dienen drei Button pro Ansicht, mit denen zur vorigen oder nächsten Messung gewechselt werden kann. Außerdem kann eine Messung anhand des Datums aufgerufen werden. Um alle Ergebnisse einer Messung zu sehen, kann das dazugehörige Programm gestartet werden, wobei die vorher angezeigte Messung direkt aufgerufen wird. Wenn das Datum einer Messung lange zurück liegt, wird dieses rot angezeigt. Die Zeit, ab der eine Messung als alt eingestuft wird, kann in den Optionen eingestellt werden. Die Positionierung der Ansichten kann in den Optionen individuell eingestellt werden. Je nach Auflösung des Bildschirms können verschieden viele Ansichten angezeigt werden. Für kleine Bildschirme kann eine scrollbare Ansicht eingestellt werden. Zum Ausdruck der Ergebnisse kann jeder Windows A4-Drucker verwendet werden. Die Positionierung der Ansichten auf dem Ausdruck kann unabhängig von der Anzeige im Programm eingestellt werden.

Anbindung: über GDT / BDT Schnittstelle oder über die Homoth-Shell
 Unterstützte Geräte: alle Homoth-Geräte
 Betriebssysteme: Win XP, 7, 8 (32/ 64 Bit)